



## CARA PENGAMBILAN SPESIMEN SEL SERVIKS UNTUK THINPREP® PAP TEST

Syarat: sampel diambil 2 minggu setelah hari terakhir menstruasi, tidak melakukan hubungan seksual selama 48 jam, tidak dalam masa pengobatan vagina selama 48 jam

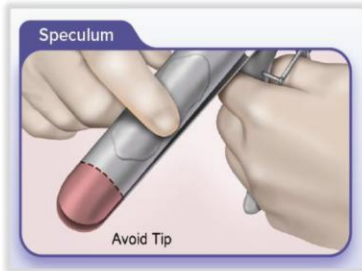

- Gunakan air hangat untuk menghangatkan dan melubrikasi speculum.  
\*Lubrikan tidak boleh mengandung senyawa karbomer

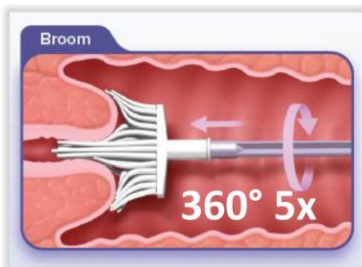

- Siapkan broom-like brush dan **masukkan bagian tengah broom** ke dalam kanal endoserviks sehingga bagian tepi broom dapat kontak dengan ektoerviks secara menyeluruh.
- Tekan perlahan, **putar** broom 360° searah jarum jam 5 kali dengan hati-hati untuk mencegah pendarahan.



- Segera celupkan brush ke dalam tabung berisi PreserveCyt solution.
- **Cuci** broom dengan menekan-nekan (arah: atas-bawah) ke bagian dasar tabung sebanyak **10 kali**.
- Setelahnya, **putar** broom (gerakan melingkar) secukupnya. Buang broom (jangan dipatahkan).



- Segera celupkan brush ke dalam tabung berisi PreserveCyt solution.
- **Cuci** broom dengan menekan-nekan (arah: atas-bawah) ke bagian dasar tabung sebanyak **10 kali**.
- Setelahnya, **putar** broom (gerakan melingkar) secukupnya. Buang broom (jangan dipatahkan).



- **Tutup** PreserveCyt solution. Pastikan garis hitam yang terdapat pada tabung dan tutup tabung sejajar.